

[CS] Návod k použití

Nourisil™ MD

Nourisil™ MD – je určen k prevenci a léčbě nových i starých keloidních a hypertrofických jizev

Co je Nourisil™ MD?

Nourisil™ MD je ultra-lehký, transparentní, samoschnoucí silikonový gel, který byl vyvinut pro ošetření a prevenci nových i starých keloidních nebo hypertrofických jizev, které jsou způsobeny chirurgickým zákrokem, zraněním, traumatem nebo popálením. Obsahuje jedinečnou směs silikonů a vitamínu E pro udržení vyvážené hydratace během ošetřování jizev. Nourisil™ MD pomáhá zplodňit, změkčit a zjemnit jizvu, zmiřňuje svědění a podráždění kůže způsobené jizvami a snižuje doprovodné začervenání a bolest. Nourisil™ MD gel má příjemný zvláčňující efekt na pokožku a není mastný. Může být jednoduše aplikován na jizvy kdekoliv na těle, včetně obličeje a kloubů. Pokud je užíván dle doporučení, Nourisil™ MD zaschne a vytvoří vrstvu, která hydratuje a ochraňuje jizvu.

Účel použití

Nourisil™ MD je určen pro ošetření a prevenci nových i starých keloidních nebo hypertrofických jizev, které jsou způsobeny chirurgickým zákrokem, zraněním, traumatem nebo popálením. Nourisil™ MD může být aplikován po zhojení rány a je určen pro aplikaci na intaktní neporušenou pokožku.

Nourisil™ MD je vhodný pro použití na všechny typy kůže, včetně citlivé pokožky a kůže dětí.

Nourisil™ MD je zdravotnický prostředek.

Pokyny k používání

- Umyjte si před a po použití ruce.
- Ujistěte se, že je pokožka, na kterou budete gel aplikovat, čistá a suchá.
- Odstraňte víčko z dispensoru. Stiskněte několikrát pumpu a vytlačte tak gel ven.
- Jemně vmasírujte malé množství Nourisil™ MD na jizvu a nechte zaschnout. Pokud je to nutné opatrně setřete přebytečný gel ubrouskem, aby zbytky neulpěly na oblečení.
- Po zaschnutí může být Nourisil™ MD překryt opalovacími prostředky nebo kosmetikou.
- Nanášejte Nourisil™ MD dvakrát denně, jednou ráno a jednou večer.

Doporučená délka léčby je 60-90 dní. Pro větší nebo starší jizvy může být vyžadována delší léčba.

Upozornění

- Nourisil™ MD není určen k aplikaci do otevřených ran ani na popáleniny třetího stupně.
- Nourisil™ MD není určen k aplikaci na porušenou nebo poraněnou kůži. V případě pochybností při používání Nourisil™ MD se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
- Zabraňte přímému kontaktu se sliznicemi a zabraňte vniknutí do očí.
- Pokud používáte na ošetření stejné oblasti kůže další přípravky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na složky produktu.
- Pokud se objeví podráždění v místě aplikace, přerušete okamžitě používání produktu a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Pouze pro vnější použití.

Podmínky uchovávání

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte při teplotách v rozmezí 4 až 25 °C.
- Nepoužívejte Nourisil™ MD více než 12 měsíců po otevření a déle než je vyznačena doba expirace na obalu (EXP).

Složení

Cyclopentasiloxane, Caprylyl Methicone, Tocopheryl Acetate, Dimethicone Crosspolymer, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Dimethicone.

Velikost balení

30 g

Další informace

Pro další informace se poraďte se svým lékárníkem nebo lékařem nebo navštivte stránky www.fagron.cz.

🏭 Výrobce

Fagron BV, Lichtenauerlaan 182, 3062 ME Rotterdam, The Netherlands

Distribučováno v České republice

přes Fagron a.s., Holická 1098/31m, 77900, Olomouc, Česká republika fagron.cz



Poslední revize příbalové informace 12/2016.

[SK] Návod na použitie

Nourisil™ MD

Nourisil™ MD – je určený na prevenciu a liečbu nových a starých keloidných a hypertrofických jaziev

Čo je Nourisil™ MD?

Nourisil™ MD je ultra ľahký, transparentný, samoschnúci silikónový gél, ktorý bol vyvinutý na ošetrovanie a prevenciu nových a starých keloidných alebo hypertrofických jaziev, ktoré sú spôsobené chirurgickým zákrokom, zranením, traumou alebo popálením. Obsahuje jedinečnú zmes silikónov a vitamínu E k udržaniu vyváženej hydratácie počas ošetrovania jaziev. Nourisil™ MD pomáha splodňiť, zmäkčiť a zjemniť jazvu, zmiernuje svrbenie a podráždenie kože spôsobené jazvami a znižuje doprovodné začervenanie a bolesť. Nourisil™ MD gél má príjemný zvláčňujúci efekt na pokožku a nie je mastný. Môže byť jednoducho aplikovaný na jazyv kdekoľvek na tele, vrátane tváre a kĺbov. Pokiaľ je používaný podľa odporúčenia, Nourisil™ MD zaschne a vytvorí vrstvu, ktorá hydratuje a ochraňuje jazvu.

Účel použitia

Nourisil™ MD je určený na ošetrovanie a prevenciu nových a starých keloidných alebo hypertrofických jaziev, ktoré sú spôsobené chirurgickým zákrokom, zranením, traumou alebo popálením. Nourisil™ MD môže byť aplikovaný po zahojení rany a je určený pre aplikáciu na intaktnú neporušenú kožu.

Nourisil™ MD je vhodný pre použitie na všetky typy kože, vrátane citlivej a detskej pokožky.

Nourisil™ MD je zdravotnícka pomôcka.

Pokyny k používaniu

- Umyte si pred a po použití ruky.
- Uistite sa, že pokožka, na ktorú budete gél aplikovať, je čistá a suchá.
- Odstraňte viečko z dispensora. Stisnite niekoľkokrát pumpu a vytlačte tak gél von.
- Jemne vmasírujte malé množstvo Nourisil™ MD na jazvu a nechajte zaschnúť. Pokiaľ je to nutné opatrne zotrite prebytočný gél vreckovkou, aby zbytky neostali na oblečení.
- Po zaschnutí môže byť Nourisil™ MD prekrytý opalovacími prostriedkami alebo kozmetikou.
- Aplikujte Nourisil™ MD dvakrát denne, jedenkrát ráno a jedenkrát večer.

Doporučená dĺžka liečby je 60-90 dní. Väčšie alebo staršie jazvy si môžu vyžadovať dlhšie trvanie liečby.

Upozornenie

- Nourisil™ MD nie je určený na aplikáciu do otvorených rán ani na popáleniny tretieho stupňa.
- Nourisil™ MD nie je určený k aplikácii na porušenú alebo poranenú kožu. V prípade pochybností pri používaní Nourisil™ MD sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.
- Zabraňte priamemu kontaktu so sliznicami a zabraňte vniknutiu do očí.
- Pokiaľ používate na ošetrovanie rovnej oblasti kože ďalšie lokálne prípravky, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
- Nepoužívajte v prípade precitliveneosti na zložky produktu.
- Pokiaľ sa objavia podráždenie v mieste aplikácie prerušite okamžite používanie produktu a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.
- Len na vonkajšie použitie.

Podmienky uchovávania.

- Uchovávejte mimo dosahu detí.
- Skladujte pri teplote v rozmedzí 4 až 25 °C.
- Nepoužívejte Nourisil™ MD viac než 12 mesiacov po otvorení a dlhšie než je vyznačená doba expirácie na obale (EXP).

Zloženie

Cyclopentasiloxane, Caprylyl Methicone, Tocopheryl Acetate, Dimethicone Crosspolymer, PEG-12 Dimethicone/PPG-20 Crosspolymer, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Dimethicone.

Veľkosť balenia

30 g

Ďalšie informácie

Pre ďalšie informácie sa poraďte so svojim lekárníkom, lekárom alebo navštivte stránky www.fagron.cz.

🏭 Výrobca

Fagron BV, Lichtenauerlaan 182, 3062 ME Rotterdam, The Netherlands

Distribučované v Slovenskej republike

cez Fagron a.s., Holická 1098/31m, 77900, Olomouc, Česká republika fagron.cz



Posledná revízia príbalovej informácie 12/2016.